

praxis
upgrade

fr win

OrthoSoftwarePower

Das starke Programm für die Diagnostik
in Ihrer kieferorthopädischen Praxis.

 **Computer konkret**
easy-dental-software

Seit fast 20 Jahren entwickeln wir bereits KFO-Diagnostiksoftware. Das ist Erfahrung, die man spürt. Unsere Produkte sind einfach zu bedienen und genügen höchsten Ansprüchen. Unser Ziel ist Ihre Zufriedenheit!

fr-win® - führend in Effizienz

Höchste Effizienz bei kieferorthopädischer Diagnostik und individueller Planung - das ist fr-win®. Die Anfertigung umfangreicher diagnostischer Unterlagen wie

- Anamnese
- Modellanalyse
- Röntgenanalyse
- Profilanalyse
- Funktionsanalyse

und die Verwaltung der Bilder und Befunde - für fr-win® kein Problem.

Sie kümmern sich um Ihre Patienten, fr-win® unterstützt Sie optimal und entlastet Sie von den zeitaufwändigen Routinetätigkeiten.

Daten erfassen - komfortabel und schnell

Mit einem Mausklick gelangen die Patientenstammdaten per Schnittstelle aus Ihrer Managementsoftware zu fr-win®, am besten funktioniert das mit unserer Managementsoftware kfo-win® oder über die VDDS-Schnittstelle. Sie können fr-win® auch offline betreiben, indem Sie die Patientenstammdaten einfach per Hand erfassen.

Selbstverständlich können Sie fr-win® an alle gängigen digitalen Röntgensysteme koppeln. Analoge Röntgenbilder scannen Sie einfach mit einem Durchlichtscanner. Der Import der Bilder von Ihrer digitalen Kamera und die Zuordnung zum Patienten gestalten sich dank Serienimport und Single-Click-Zuordnung einfach.

Analysemethoden - vielfältig und individuell

fr-win® bietet mehr als 100 praxiserprobte Analysen. Wir arbeiten bei deren Definition Hand in Hand mit Universitäten und Bildungseinrichtungen zusammen. Wählen Sie einfach Ihre Analyse-Favoriten.

Ihre individuelle Analysemethode ist noch nicht dabei? Kein Problem. Modifizieren Sie Analysen nach Ihren Vorstellungen. Auf Wunsch gestalten wir auch Ihre ganz individuelle Hausanalyse. fr-win® lässt bereits im Standardlieferungsumfang kaum Wünsche offen. Hier ein kleiner Einblick in unseren Analyse-Pool:

Seitliche und frontale Fernröntgenanalysen

Für die klassische Fernröntgenanalyse bietet Ihnen fr-win® u.a. Auswertungen nach Bergen, Bjork, Hasund, Jarabak, McNamara, McGann, Rakosi, Ricketts, Segner, Steiner, Sato, Slavicek, Tweed und Wingberg. Selbstverständlich können Sie auch frontale Fernröntgenbilder z.B. nach Ricketts analysieren.

Seitliche und frontale Fotoauswertungen


Fotostat-Auswertungen für Enface und Profil mit Gesichtsformen z.B. nach A.M. Schwarz sind Bestandteil der kieferorthopädischen Diagnostik und natürlich auch von fr-win®.

Modellanalysen

Modelle können Sie in fr-win® differenziert nach Wechsel- und bleibendem Gebiss auswerten. Auch hier hält fr-win® eine Vielzahl von Analysen mit Normwerten u.a. nach Korkhaus, Moyers, Schmuth und Weise für Sie bereit.



fr-win® bedeutet höchste Effizienz bei kieferorthopädischer Diagnostik und individueller Planung.

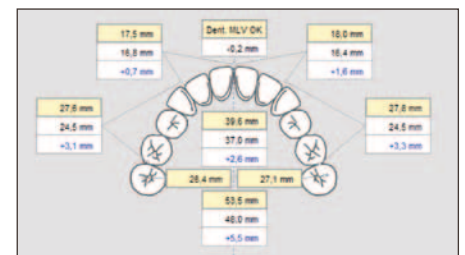

Effektiv: Modellanalyse mit digitalem Messschieber

Handröntgenanalyse

Zur Bestimmung des skelettalen Alters Ihrer Patienten können Sie auf eine grafische Handröntgenanalyse zurückgreifen.

Digitalisieren - einfach und übersichtlich

fr-win® macht Ihnen das Digitalisieren der Bilder besonders einfach. In den Auswertungsfenstern bieten wir Ihnen verschiedene Visualisierungen an:

- Darstellung des Bildes eingepasst in das Fenster oder im Zoom
- Ausschnittvergrößerungen um die Cursorposition
- Punktdarstellung grafisch und verbal

Die Referenzpunkte werden einfach per Mausklick an die entsprechende Stelle auf dem Bild gesetzt. Sie können direkt während des Digitalisierens auf Werkzeuge für Zoom, Helligkeit, Kontrast, Negation, Struktur- und Profilverbesserung sowie weitere spezielle Filter zurückgreifen. Somit haben Sie immer ein optimales Bild für Ihre Diagnostik. Optional bietet Ihnen fr-win® weitere effektive Tools.


Sie möchten beim Digitalisieren einen Punkt korrigieren? Kein Problem. Sie können einfach einen Punkt zurückgehen und nochmals klicken. Wir empfehlen Ihnen die Korrektur am Ende durchzuführen - verschieben Sie einfach die Punkte an die gewünschte Stelle.

Präsentation auf Knopfdruck

Zeigen Sie Ihren Patienten Ihre Behandlungsmethoden und -erfolge! Nutzen Sie dazu die vielfältigen Möglichkeiten von fr-win® für die Präsentation der Auswertungsergebnisse und Bilder.

Messergebnisse

Vergleichen Sie Messwerte mit Normwerten und Standardabweichungen. Die Normwerte können alters- und geschlechtsabhängig sein.

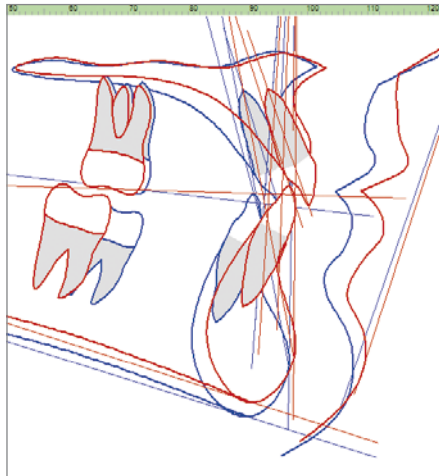

Einfach: Überlagerung in beliebigen Ebenen

fr-win® unterstützt Sie mit Diagnosehinweisen in Abhängigkeit von der Relation zum Normwert oder zur Abweichung. Stellen Sie einfach Anfangs-, Zwischen- und Endbefund gegenüber.

Grafik

Wählen Sie das Layout der Durchzeichnung: Referenzpunkte, Hilfslinien, Bemaßung und Bild können wahlweise ein- bzw. ausgeblendet werden.


Überlagerung

Nutzen Sie die Überlagerung von Anfangs-, Zwischen- und Endbefunden auf einen Blick. Definieren Sie dafür Ihre eigenen Ebenen und Farben.

Galerien

Zeigen Sie Ihren Patienten alle Bilder auf einen Blick: Anfangs-, Zwischen- und Endbefund. Präsentieren Sie die Bilder einer Sitzung als Diashow. Definieren Sie eigene Galerien.

Optional können Sie mit dem Modul fr-win® „extended“ durch Überlagerung von Simulation und Foto Ihre Behandlungsplanung visualisieren. Simulieren Sie in der Überlagerung aus seitlichem Foto, Röntgenbild und Durchzeichnung.

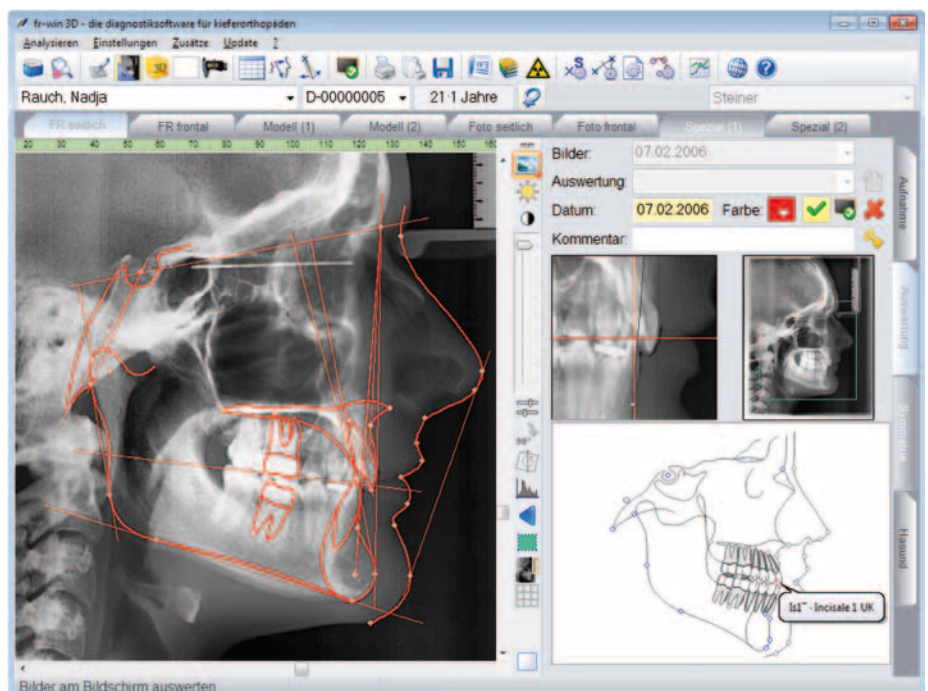

Übersichtlich: Digitalisieren mit fr-win®

Modell-Vermessung - je nach Wunsch

fr-win® unterstützt verschiedene Abläufe, Sie können wählen:

- Messen Sie mit der Hand und erfassen Sie die Messwerte im Modellschema per Tastatur.
- Messen Sie mit einem digitalen Messschieber, fr-win® trägt die Werte per Knopfdruck direkt in das Modellschema ein.
- Scannen Sie Ihre Modelle und setzen Sie die Referenzpunkte direkt am Bildschirm.

So sparen Sie Zeit.

Die aufwendigen Berechnungen von Stützzonen, Bogenlängen etc. übernimmt fr-win® in jedem Fall.


Einfachster Export und Druck

fr-win® bietet Ihnen für jede Auswertung jeweils geeignete Formulare. Sie können jederzeit auf alternative Formulare zurückgreifen. Natürlich können Sie auch Ihre individuellen Formulare verwenden.

Der Export von Patientendaten und Auswertungen nach MS-Word® ist für fr-win® selbstverständlich. fr-win® ermöglicht das Versenden und Empfangen von E-Mails mit Bildern als Anhang.

Exportieren Sie Ihre Bilder in zahlreichen Standard-Formaten auf einen beliebigen Datenträger. Haben Sie darüber hinaus vor, Auswertungsergebnisse und Punktkoordinaten zu exportieren - fr-win® macht es möglich.

Anschließend können Sie Ihre Daten sehr einfach in Excel® oder anderen geeigneten Programmen verarbeiten.

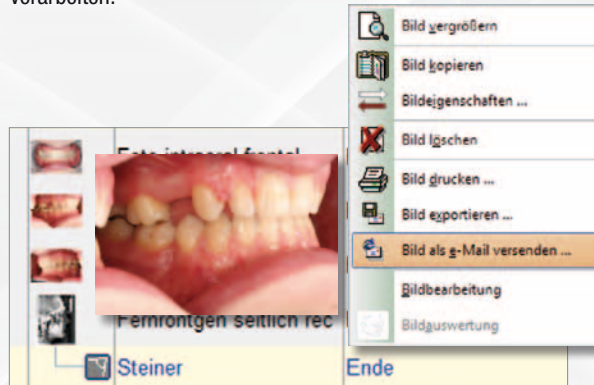

Integriert: Mailversand direkt aus fr-win®

fr-win® unterstützt Sie umfangreich bei der täglichen diagnostischen Arbeit in Ihrer Praxis.

Gern demonstrieren wir Ihnen unsere Software Online oder ganz individuell vor Ort. Lassen Sie sich von den Vorteilen unserer Lösungen überzeugen.