



SEGO | **SOFT**
Process Documentation

SegoLabel Software für den Etikettendruck

Einfache und sichere Chargenrückverfolgbarkeit

Ziel einer rechtssicheren Dokumentation ist es, eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von der Aufbereitung des Medizinproduktes bis hin zur Anwendung am Patienten zu garantieren. Dies ermöglicht SegoLabel auf einfache Weise und die umständliche und risikobehaftete Beschriftung von Hand wird dadurch vermieden.

SegoLabel – Einfache automatische Kennzeichnung

Die Verpackungen mit den sterilisierten Instrumenten werden nach der Sterilisation und Freigabe durch Aufbringen eines Etikettes gekennzeichnet. Der Etikettendruck erfolgt direkt nach dem Freigabedialog aus SegoSoft, da nur nach zufriedenstellender Produktfreigabe Chargen-Etiketten gedruckt werden können. Sämtliche wichtigen Daten wie der Gerätenname, die Seriennummer, Prozessdatum, Haltbarkeitsdatum, Chargennummer und die freigebende Person werden automatisch auf die Etiketten übertragen und können in beliebiger Anzahl gedruckt werden.

► **Effektiv, sicher, immer richtig**


SegoLabel – Eine Chargenrückverfolgbarkeit vom Patienten aus

Zur Anwendung kommen Sego TTR Sandwich Haftetiketten. Durch die zweifache Klebeschicht können die Etiketten auf eine Folienverpackung aufgebracht werden. Beim Öffnen des verpackten Instrumentensets wird das Etikett durch die eingestanzte Ablösehilfe von der zweiten Klebeschicht abgelöst und z. B. in die Patientenakte oder das OP-Protokoll geklebt. Der Barcode, der durch die SegoLabel Software auf dem Etikett abgedruckt wird, gibt die Chargennummer wieder. Diese ermöglicht die Zuordnung zu den Sterilisations-Protokollen und kann mit herkömmlichen Barcodescannern direkt in die digitale Patientenakte eingelesen werden.

► **Vereinfachte Chargenrückverfolgbarkeit**



SegoLabel – Auf einen Blick

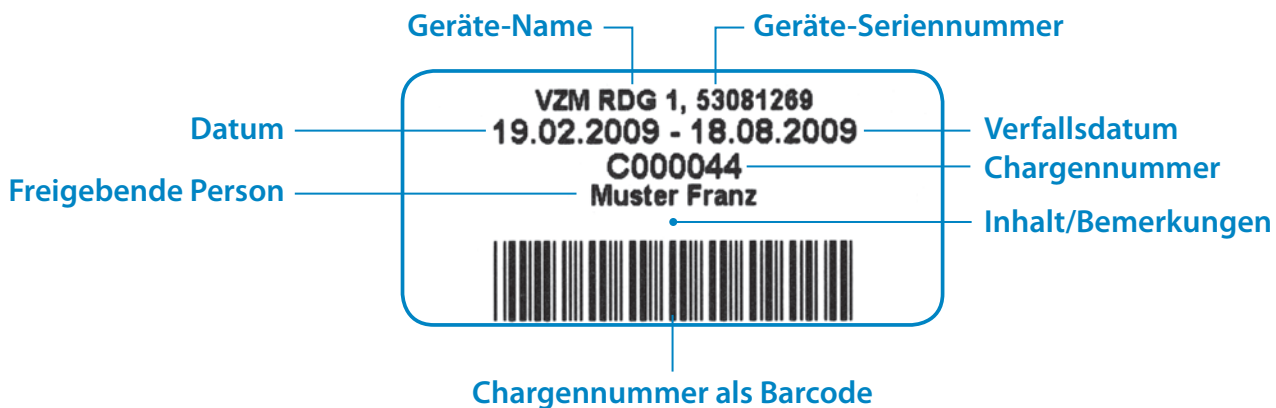

Systemvoraussetzungen

Voraussetzung für den Gebrauch von SegoLabel sind ein Windows PC mit installierter SegoSoft Software und das SegoLabel Starterkit. Dieses beinhaltet die SegoLabel-Software sowie einen Etikettendrucker mit Etiketten, auf denen die Chargeninformationen gedruckt werden.

- Personalcomputer mit CPU Taktfrequenz von mind. 1,6 GHz, empfohlen ab 2,0 Ghz
- Hauptspeicher mind. 1 GB, empfohlen 4 GB
- Grafiksystem SVGA mit 1024 x 768 Bildpunkten, 17 Zoll Monitor oder besser
- Festplatte mit mind. 1 GB freiem Speicherplatz, empfohlen ab 10 GB
- CD-ROM Laufwerk zur Installation
- USB-Schnittstelle
- Windows 2000 / XP / VISTA / 7 Professional
- Drucker (240 x 140 x 200)

www.sego-soft.info

Per Fax an **comcotec: +49 (89) 3270 889-89**

Ich habe Interesse an der SegoSoft-Lösung.
Bitte informieren Sie mich.

Firma/Organisation

Vorname

Name

Straße

PLZ/Ort

Bitte Kontakt per E-Mail:

Bitte Kontakt per Telefon:

Stempel